

Ficha técnica Mascarilla

PUBLICIDAD Y REGALOS VILA, S.L.U

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE CERTIFICADO UNE-0065:2020

- Tejido: 92% POLIÉSTER + 8% EA HIDROFUGADO Y ANTIBACTERIANO.
- Filtración aerosoles: >95%
- Filtración partículas: >94% norma UNE-EN149
- Ensayo de filtración bacteriana (8BFE) según apartado 5.2.2 de la norma UNE-EN15683:2019+AC:2019>92.
- Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto determina la normativa EN-13795.
- Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065.
- Pruebas realizadas según norma UNE-EN14683:2019+AC2019-UNE 0065:2020
- Ajuste facial: >95% (Ajuste a nariz y boca)
- Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42.

NORMAS DE LAVADO.

- Lavar a máquina 60° durante más de 1 hora con jabón neutro.
- Se recomienda secado en secadora.
- EFICACIA ANTIBACTERIANA HASTA 25 LAVADOS.

COMPONENTES

Confección, Tejido y Componentes son de fabricación Nacional



Varilla nasal



Dobladillo




Goma Negra o Blanca



Doble cosido frontal

TALLAS

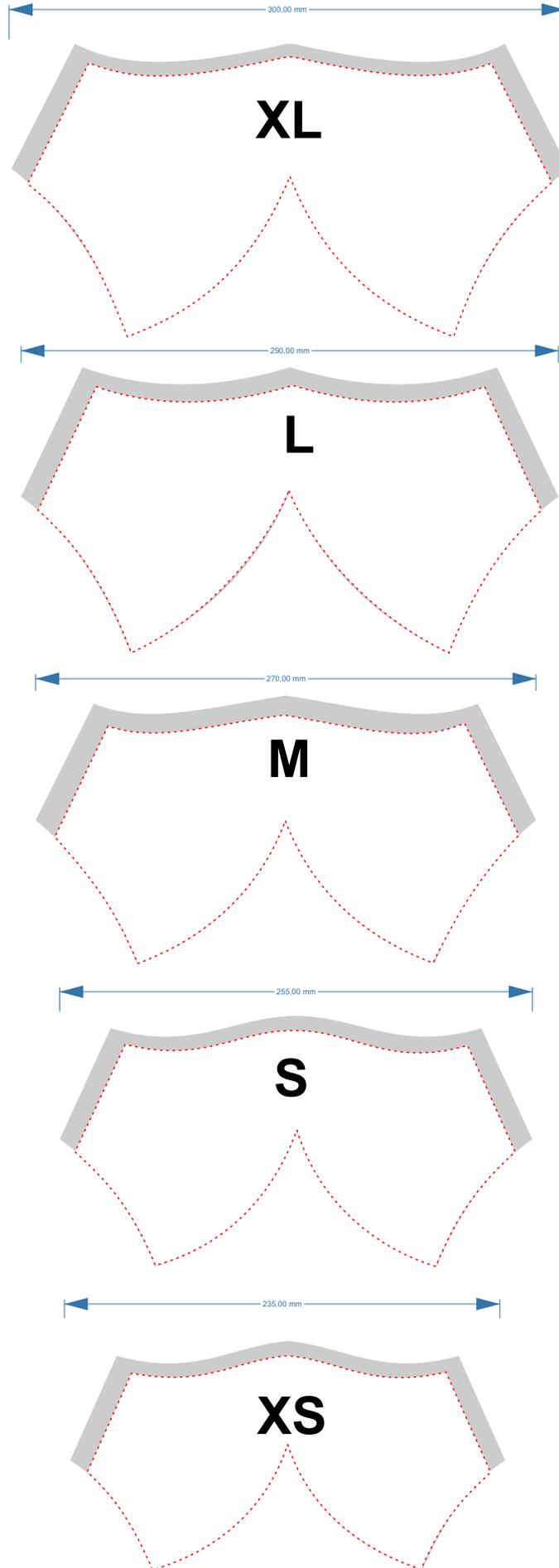

 Doblado




TARJETA PACKAGING



Colocación de la mascarilla:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar las gomas en ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y verificar que la cubre.
6. Pellizcarla pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

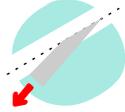

*Pinza nasal extraíble, en la parte interior de la mascarilla hay una ranura para extraer o substituir la pinza.

Normas de Lavado:



1. Lavar a máquina 60º durante más de 1 hora con jabón neutro.
EFICACIA ANTIBACTERIANA HASTA 25 LAVADOS*
* Si se utiliza 8h por día, limpiar la mascarilla 1 vez cada 7 días. Según el uso de la mascarilla, la frecuencia de lavado puede variar en + o -.



2. Se recomienda secado en secadora.

PUBLICIDAD Y REGALOS VILA, S.L.U - C.I.F. B63451363 - www.rgvalos.com

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE CERTIFICADO UNE-0065:2020

- Tejido: 92% POLIÉSTER + 8% EA HIDROFUGADO Y ANTIBACTERIANO.
- Filtración aerosoles: >95%
- Filtración partículas: >94% norma UNE-EN149
- Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según apartado 5.2.2 de la norma UNE-EN14683:2019+AC:2019->92.
- Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto determina la normativa EN-13795.
- Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065.
- Pruebas realizadas según norma UNE-EN14683:2019+AC2019-UNE 0065:2020
- Ajuste facial: >95% (Ajuste a nariz y boca)
- Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42.

EFICACIA ANTIBACTERIANA HASTA 25 LAVADOS*

* Si se utiliza 8h por día, limpiar la mascarilla 1 vez cada 7 días. Según el uso de la mascarilla, la frecuencia de lavado puede variar en + o -.

Producto de fabricación NACIONAL



La confección y todos los componentes de esta mascarilla son fabricados en España.

PUBLICIDAD Y REGALOS VILA, S.L.U - C.I.F. B63451363 - www.rgvalos.com